




# QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP

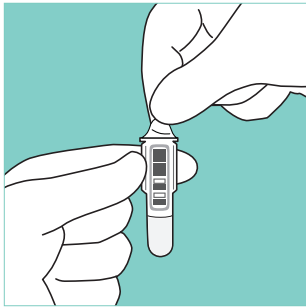


**1** Poista suojakalvo kyvetin päältä. Älä koske kyvetin alaosaan.

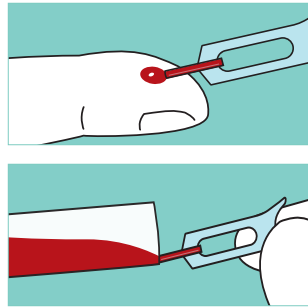


**2** Pidä QuikRead go Sample Collector 10µl -näytteenotinta lähes vaakatasossa ja ota näyte asettamalla kärki juuri näytteen pinnan alle. Täytä näytteenottimen kapillaariosa kokonaan.

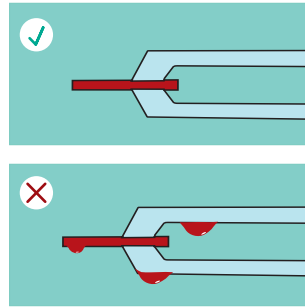


**Huom!** Tarkista, että kapillaariosa on täynnä. **Älä pyyhi näytteenotinta!** Jos näytteenottimessa on ylimääräistä näytettä, hävitä näytteenotin.

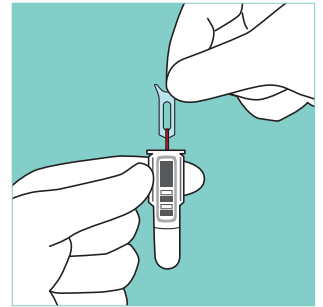

**3** Laita näytteenotin kyvettiin kahden (2) minuutin kuluessa näytteenotosta.

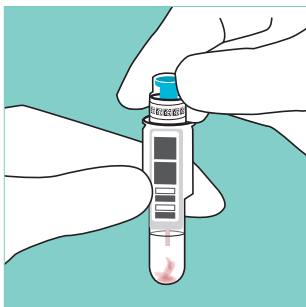

**4** Sulje kyvetti huolellisesti easy CRP -reagenssikorkilla. Älä paina korkin turkoosia sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.

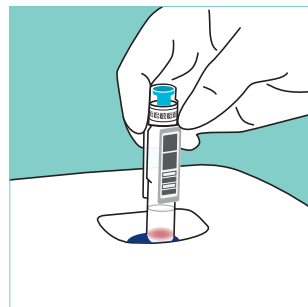

**5** Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä **Mittaus**. Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin.



**6** Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta.

Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.

# QuikRead go<sup>®</sup> easy CRP



Reagenssi-  
pakkaus

Avaamaton pakkaus 2–25 °C:n lämpötilassa:  
pakkauksen viimeiseen **käyttöpäivämäärään** saakka



Kyvetit

Avaamaton foliopussi 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivä-  
määrään** saakka

Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen:  
säilytys 2–8 °C: **6 kuukautta** / säilytys 18–25 °C: **3 kuukautta**



Avattu kyvetti

Anna puskurin lämmitä huoneenlämpöiseksi (18–25 °C) ennen testin suorittamista.

Testi tulee tehdä **kahden (2) tunnin** kuluessa kyvetin avaamisesta.  
Näyte säilyy puskuriliuoksessa **kahden (2) tunnin** ajan.



Reagenssikorkit

Avaamaton putkilo 2–25 °C: pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivä-  
määrään** saakka

Avaamisen jälkeen 2–25 °C: **6 kuukautta**



Näytteen-  
ottimet

Säilytys 2–25 °C: QuikRead go Sample Collector 10µl -pakkauksen **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka



CRP-kontrollit

Avaamattomat pullot 2–8 °C: **viimeiseen käyttöpäivämäärään** saakka  
Avattu pullo 2–8 °C: enintään **2 kuukautta**

## Yhteystiedot

Aidian Oy

info@aidian.fi

050 380 9684

Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510

tai asiakaspalvelu@mediq.com

www.aidian.fi

www.quikread.com

Tuote	Tuotenro	Tilausno, Mediq Suomi
QuikRead go easy CRP, 50 testiä sisältää QuikRead go Sample Collector 10µl -näytteenottimet	153287	1703003
QuikRead go CRP Control Low	153765	1703060
QuikRead go CRP Control	153764	1703061
QuikRead go CRP Control High	153763	1703062
QuikRead go -laite	135867	-
QuikRead go Sample Collector 10µl	153211	1703207