



Object: IFU EASY ICE cold pack – rev. 11 – 09/2019

FINNISH - FI

KERTAKÄYTTÖINEN KYLMÄPUSSI - KÄYTTÖOHJEET: Riko pussin sisällä oleva vesipussi puristamalla pussia molemmilla käsillä. Ravista sen jälkeen pussia, jotta sisältö sekoittuu. Laita pussi kohdealueelle.

KÄYTTÖTARKOITUS: Hematoomat, revähdykset, loukkaantumiset, hypertermia ja muut kylmähoitoa vaativat tapaukset.

VAROITUKSET: Vain ulkoiseen käyttöön; kertakäyttötuote. Älä käytä, jos pussi on vahingoittunut. Älä riko pussia ja estä pussin sisällön vuotaminen. Pussin sisältö aiheuttaa tahraantumista ja ärsytystä (jos sisältö pääsee kosketukseen ihon kanssa, huuhtelee ihoa vedellä 15 minuutin ajan), ja se on vahingollinen (jos sisältöä niellään, ota heti yhteyttä ensiapuun). Säilytys huoneenlämmössä ja poissa lasten ulottuvilta sekä kaukana lämmönlähteistä ja helposti syttyvistä materiaaleista. Älä pakasta pussia, äläkä käytä vahingoittuneella iholla. Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla on sydän- ja verisuonitauteja, verenkiertoelimistön tauteja, diabetes ja/tai ihoherkkyyttä (Raynaudin syndrooma), jos tuotetta käyttävät pikkulapset, lapset tai vanhukset tai jos et ole varma miten tuotetta käytetään tai oireet eivät häviä.

AINESOSAT: urea, ammoniumkloridi ja vesi.

Lääkinnällisen laitteen luokka II a