



Nocolyse

Desinfektioaine



Nocospray suurtehosumuttimessa käytettävä desinfektioaine. Vetyperoksidiin perustuva kuivahöyrytys on tehokas, jopa itiövaikutteinen kovien ja pehmeiden pintojen desinfiointiin soveltuva desinfektio menetelmä.

Käyttökohteet

Vetyperoksidiin perustuva kuivahöyrytys on tehokas, jopa itiövaikutteinen kovien ja pehmeiden pintojen desinfiointiin soveltuva desinfektio menetelmä suljetuissa sisätiloissa, kuten huoneet, työtilat, ambulanssit jne.

Desinfektio menetelmää suositellaan käytettäväksi siivouksen jälkeen. Erikoistilanteissa, esim. mikäli toimenpiteen tarkoituksena on henkilökunnan altistumisen ehkäisy, vetyperoksidisumutus voidaan tehdä siivousta edeltävänä toimenpiteenä.

Tuotteen teho on testattu uusimman EN 17272 standardin mukaisesti (standardi ilmajäljettöiselle automaattiselle desinfektioille). Uusi EN 17272 standardi kattaa bakterisidisen, fungisidisen, mykobakterisidisen, virusidisen ja sporisidisen (itiö) tehon sekä jakelutestin (distribution test), joka osoittaa sen, että aine leviää ja vaikuttaa vaatimusten mukaisesti käsiteltävän tilan kaikilla pinnoilla. EN 17272 standardin vaatima annostus perustuu aina vakavimpaan mahdolliseen tilanteeseen.

Tuoteominaisuudet

Nocospray suurtehosumutin annostelee desinfektioainetta määritellyn huonetilavuuden mukaan 7 ml/m³.
Sumutusaika n. 36 s – kontaktiajan pituus 120 min.

Käyttö- ja annostusohje

Irrota laitteesta pulloon kiinnitettävä yhdistäjä. Avaa Nocolyse-pullon turvatulppa, ohjaa yhdistäjän letku pulloon, kierrä pullo hyvin kiinni yhdistäjään ja aseta kokonaisuus tiiviisti takaisin paikalleen.

Nocospray vetyperoksidikuivahöyrytys:

Aseta laite mieluiten tilan nurkkaan siten, että kuivahöyry pääsee esteettömästi tilaan. Arvioi huoneen kuutiotilavuus ja valitse laitteesta oikea arvo (10 - 143 m³), käynnistä laite. Laite annostelee desinfektioainetta määritellyn huonetilavuuden mukaan 1 ml / kuutiometri. Annostus saavutetaan laitesäädöllä: lisää käsiteltävän tilan kuutiomäärä x7. Merkkiäänä (10 s.) aikana poistu huoneesta ja sulje ovi. Kontaktiaika 2 h. Tämän jälkeen huone on käytettävissä normaalisti.

Nocotest-kontrolliliuskat (tuotekoodi 8079): Ennen vetyperoksidikuivasumutusta kostuta liuskoja vedellä ja aseta niitä paikkoihin, joiden desinfektio näyttää hankalimmalta. Liuskojen väri muuttuu, kun desinfektioon tarvittava määrä kuivasumutettua vetyperoksidiä osuu niihin. Pakkaus sisältää 100 kpl.

Huomioitavaa

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tutustu Nocospray-laitteen kirjallisiin käyttöohjeisiin.

Menetelmä ei edellytä ovien tiivistämistä tai ilmastoinnin sulkemista, mutta sumutus- ja kontaktiaikana käsiteltävässä tilassa ei voi oleskella tai käydä.

Mikäli käynti on välttämätön ja lyhytaikainen, on käytettävä tiiviitä suojalaseja ja kertakäyttöistä hengityssuojainta. Pitkäaikaisemmassa käytössä kesken sumutuksen on käytettävä hengityksensuojainta NO-P3 kaasusuodattimella. Lue suojautumisohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus

Tehoaine		Vaikutus
Vetyperoksidia	6 %	mikrobisidinen tehoaine
hopea	17 ppm	katalysaattori

Tuotteen pH

4.5 hapan

Varastointi

Lämmin varasto, 5-25°C. Avaamaton pakkaus säilyy 2 v. valmistusajankohdasta. Käytä avattu pakkaus 2 kk aikana.

Ulkonäkö ja tuoksu

Väritön neste.

Valmistusmaa

RANSKA

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN
	8521	
	8522	
6 x 1 l	8078	
1 x 5 l	8525	



Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.