




Kiilto Pro Innova 100

Terveysthuollon konepesuaine

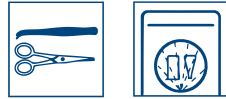

Tehokas, vaahtoamaton ja materiaalimyötäinen terveydenhuollon välineistön konepesuaine erityisesti vaatimaan välinehuoltoon, jossa puhdistetaan monista eri materiaaleista valmistettuja instrumentteja ja välineistöä.

Käyttökohteet

Terveysthuollossa käytettävät instrumentit ja hoitovälineet, joiden materiaalina esim. ruostumaton teräs, erilaiset muovit, silikonit ja kumi. Korroosiolta suojaavien ominaisuuksiensa ansiosta voidaan käyttää jopa alumiinille ja eloksoidulle alumiinille. Soveltuu hyvin myös suun terveydenhuollon välineistön koneelliseen pesuun.

Lääkinnällinen laite, ammattikäyttöön.

Tuot ominaisuudet

Tehokas, vaahtoamaton ja materiaalimyötäinen terveydenhuollon välineistön konepesuaine erityisesti vaatimaan välinehuoltoon, jossa puhdistetaan monista eri materiaaleista valmistettuja instrumentteja ja välineistöä.

Pakkausvaihtoehdot varmistavat yhteensopivuuden erilaisiin pesu- ja desinfiointikonemalleihin keskittyneissä välinehuolloissa sekä pienemmissä yksiköissä.

Käyttö- ja annostusohje

Pesuaineastia liitetään pesukoneen automaattiseen annostelulaitteistoon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Ohjeellisena annostuksena 0,20 - 0,50 % pitoisuus. Annostuksen määrään vaikuttavat pestävä materiaali sekä veden laatu. Pesulämpötilasuositus n. 55°C, käyttö lämpötilavälillä 40 - 80°C.

Noudata instrumenttivalmistajien erityisohjeita.

Lajittele välineistö asianmukaisesti telineisiin ja aseta pestävät instrumentit koneeseen. Pesukoneen vesisuihkujen on päästävä esteettömästi pestävän välineistön kaikille pinnoille. Kone ottaa pesuaineet pesuohjelmien mukaisesti. Pesulaite lämpödesinfioi puhdistetun välineistön ja koneen sisäosat.

Jos koneessa on käytetty aiemmin muuta pesuainetta, letkut huuhdellaan vedellä huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Vesihuuhtelu on suositeltavaa myös kanisterien vaihtojen yhteydessä.

Pese täydet koneelliset mikäli mahdollista. Pyri noudattamaan suositeltuja pesuaine annostuksia. Energian säästämiseksi, käytä mahdollisimman alhaista pesulämpötilaa, suositus n. 55°C.

Huomioitavaa

Tuote luokitellaan lääkitinnälliseksi laitteeksi (luokka I).

5 litran pakkauskokoja on kaksi. Tuotekoodi 8235 on ns. eurokanisteri (matala kanisterimalli).

Koostumus	Tehoaine		Vaikutus		
	Kaliummetasilikaattia	< 5 %	pH:n säätelijä, irrottaa likaa, korroosiosuoja		
	Kompleksinmuodostajia	5 - 15 %	sitovat veden kovuustekijöitä		
	Polykarboksylaattia	< 5 %	pesuteho, irrottaa likaa ja sitoo sen veteen		
	Fosfonaatteja	< 5 %	pehmentää vettä, dispergoi likaa, nopeuttaa huuhtoutuvuutta		
	Kaliumhydroksidia	< 5 %	pH säätelijä, emäs, irrottaa likaa		
	Amfoteerisiä tensidejä	< 5 %	pesuteho		
Tuotteen pH	12.5 vahvasti emäksinen				
Käyttöliuoksen pH	11.0 emäksinen				
Varastointi	5 - 25°C, 2 v. valmistusajankohdasta				
Valmistusmaa	SUOMI				
Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus	Kiilto Innova 100 konepesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea). Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on ympäristömyötäinen, täysin kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. Tuotetta ei saa päästää suoraan ympäristöön.				
Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN	eurocanister
	3x5l Eur	8235	6417964082357	6417964486162	
	3 x 5 l	8229	6417964082296	6417964485202	
	1 x 200 l	8228	6417964082289		
					
Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com .				