

Tuotenumero 1000021292

ABENA®

Vaipat, ABENA Slip, L4, white, vihreä värikoodi, Premium

- ✓ Imukykyinen ydin Top-Dry-teknologian ansiosta
- ✓ 360 asteen vuotosuojaus
- ✓ Joustavat jalantiet takaavat optimaalisen istuvuuden
- ✓ Kosteusindikaattori täyttöasteikolla
- ✓ Tukee ihon terveyttä

**Tuotekuvaus**

ABENA Slip on Premium-luokan täysin hengittäviä, anatomisesti muotoiltu teippivaippa keskivaikeaan tai vaikeaan inkontinenssiin. Imukykyisen ytimen Top-Dry-teknologia varmistaa nopean imeytymisen ja pitää tuotteen pinnan kuivana jopa useamman virtsaamiskerran jälkeen. Näkyvät ja näkymättömät vuotosuojat ja joustavat jalantiet antavat yhdessä kattavan 360 asteen suojan vuotoja vastaan. Nämä kaikki ominaisuudet suojaavat ihoa ja ylläpitävät ihon luonnollista pH-tasapainoa. Hajunsulkujärjestelmä minimoi epämiellyttävät hajut. Laadukkaat, joustavat, kaksoisteipit takaavat optimaalisen istuvuuden ja helpon uudelleenkiinnityksen. Asteikollinen kosteusindikaattori auttaa käyttäjää ja hoitajaa valitsemaan tuotteen, jolla on oikea imukyky ja määrittämään sopivan vaihtovälin. Dermatologisesti testatuille tuotteille on myönnetty Joutsenmerkki.

**Tuoteominaisuudet**

Lyhyt nimi	Vaipat
Brändi	ABENA
Alabrändi	Slip
Koko	L4
Väri	White
Ominaisuudet	Vihreä värikoodi
Materiaali	ECF fluff, elasticated combi tape, PE, BTBS, elastaani, kuitukangas, polypropeeni, hartsi, SAP
Pituus/syvyys	970 mm
Leveys	800 mm
Lantionympärys	100-150 cm
Toleranssi	+/- 10%
Rothwell-imukyky	4000 ml
Sukupuoli	Unisex
Laatu	Premium
Todistukset	CE. Joutsenmerkki. MD. UKCA.
Joutsenmerkki, lisenssinumero	5023 0001
CE-luokka	Class I
Tuote- tai testistandardit	ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745

Turvallisuusohjeet ja varoitukset	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Tuotteen koostumuksesta johtuen sillä on viimeinen käyttöpäivä, joka on laskettu valmistuspäivästä alkaen:	5 vuotta
Säilytysohjeet	Store dry, room temperature and no direct sunlight.
Tuotteen hävittämisohejeet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.
Pakkauksen hävittämisohejeet	Voidaan kierrättää tai polttaa.

Käyttöohjeet

Keskivaikeaan ja vaikeaan inkontinenssiin tarkoitettu teippivaippa erittäin vaativiin tilanteisiin ja vuodepotilaille. Tuotteen koon tunnistaa värikoodien, nimien ja numerointijärjestelmien avulla. Oikea koko valitaan lantion ympärysmittaan mukaan, joten se on tärkeä mitata. Oikean imukykyyn valitsemalla ehkäistään ohivuotoja. Muotoile suoja pituussuunnassa taustapuoli ulospäin niin, että keskelle syntyy kouru. Pujota suoja jalkojen väliin. Levitä suoja jalkojen väliin suppilomaiseen muotoon levittämällä suojaa edestä. Kiinnitä ensin alemmat teipit viistosti ylöspäin molemmilta puolilta. Kiinnitä sitten ylemmät teipit kummaltakin puolelta alaviistoon niin, että vaippa on mukavasti ja kehonmyötäisesti. Voit pukea tuotteet joko pystyasennossa (sekä omatoimisesti että avustettuna) tai makuuasennossa. Katso lisätietoja esitteessämme olevasta pukemisohejeesta.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	72 kpl	61.6 cm	40 cm	36.7 cm	5713571000274
pkt	18 kpl	37 cm	17.5 cm	29 cm	5713571000267
kpl	1 kpl				



Pohjoismainen Joutsenmerkki on virallinen pohjoismainen ympäristömerkki. Joutsenmerkillä varustetut tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset raaka-aineiden, tuotannon, käytön, dokumentoinnin ja turvallisuuden osalta.



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



UKCA-merkki osoittaa, että tuote on turvallinen käyttää, ja että se noudattaa kaikkia tuotestandardien ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisia turvatoimia.



Haaraosassa ja imukykyisen ytimen ympärillä olevat vuotosuojat ehkäisevät ohivuotoja ja varmistavat optimaalisen istuvuuden.



Tuotteen joustavat teipit varmistavat parhaan mukavuuden, istuvuuden ja vuotosuojan yhdistelmän. Uudelleenkiinnitys on mahdollinen sinisen kaksoisteipin ansiosta.



Takaa, että tuotteemme on testattu sellaisten ainesosien varalta, jotka voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Testit on suorittanut riippumaton kolmannen osapuolen laboratorio.



Ainutlaatuinen imukyinen ydin imee ja lukitsee virtsan nopeasti, minkä ansiosta tuotteen pinta pysyy kuivana useamman virtsaamiskerran jälkeenkin.



Hajujensitomisoimaisuus on tärkeä tekijä huomaamattomuuden varmistamiseksi. ABENA-inkontinenssituotteet on suunniteltu ja valmistettu minimoimaan epämiellyttävät hajut mahdollisimman hyvin.



Kosteusindikaattori on nesteeseen reagoiva nauha, joka vaihtaa väriä tai haalistuu, kun on aika vaihtaa tuote.



100-prosenttisen hengittävyyden, Top-Dry-ominaisuuden ja vuotosuojan yhdistelmä pitää tuotteen pintakuivana ja ihoystävällisenä jopa useamman virtsaamiskerran jälkeen ja säilyttää ihon luonnollisen pH-tasapainon.



Ei sisällä lateksia.



Täysin hengittävä tuote on miellyttävä myös pitkäaikaisessa käytössä. Auttaa ylläpitämään ihon terveyttä.



Ainutlaatuinen Top-Dry-teknologia takaa nopean imeytymisen ja pitää tuotteen pinnan kuivana jopa useamman virtsaamiskerran jälkeen.



Tippamerkintä ilmaisee tuotteen imukyvyn. Mitä enemmän tippoja on, sitä korkeampi on imukyky. Imukyvyn määrä voi olla 1–9 tippaa.



Pussi on 30-prosenttisesti PCR-muovia eli valmistettu kuluttajien kierrättämästä muovimateriaalista. Näin voimme vähentää muovijätteen määrää ja auttaa pitämään huolta ympäristöstä.

