

DESIOL

Pesevä etanolipohjainen desinfektioaine

EN 13727 • EN 13624 • EN 13697 • EN 14348 • EN 14561 • EN 14562 • EN 14563
• EN 14476:2013 + A1:2015 • EN16615

Desiol on pesevä etanolipohjainen desinfektioaine lääketieteellisten ei-invasiivisten instrumenttien ja välineiden sekä terveydenhuollon hoitoympäristöjen pintojen puhdistukseen ja desinfektioon.

Desiol on mikrobisidisesti tehokas desinfektioaine, joka tuhoaa bakteerit, hiivat, homeet ja virukset. Poikkeuksen muodostavat bakteeri-itiöt, joihin etanolituotteet eivät tehoa. Pesevien tensidijohdannaisten ansiosta Desiol kestää orgaanista rasiusta ja tunkeutuu liian läpi. Tuotteen pH on neutraali eikä se sisällä hajusteita, väriaineita tai klooriyhdisteitä.

Desiolia voidaan käyttää kaikille alkoholeja kestäville materiaaleille, myös useimmille muoveille lukuun ottamatta akryylimuovia (PMMA). Laitteiden kohdalla on noudatettava laitevalmistajan ohjeita laitteen puhdistukseen. Lasi- ja metallipinnoille suosittelemme Desinfektol P -desinfektioainetta.

Mikrobisidinen teho

Desiol on testattu seuraavien eurooppalaisten standardien mukaan ja se täyttää niiden asettamat vaatimukset:

Bakteerit

- EN 13727 Kvantitatiivinen suspensiotesti, bakterisidinen teho (faasi 2/1)
- EN 14348 Kvantitatiivinen suspensiotesti, mykobakterisidinen teho (faasi 2/1)
- EN 14561 Kvantitatiivinen kantajatesti, bakterisidinen teho (faasi 2/2)
- EN 14563 Kvantitatiivinen kantajatesti, mykobakteridisidinen ja tuberkulosidisidinen teho (faasi 2/2)

Homeet ja hiivat

- EN 13624 Kvantitatiivinen suspensiotesti, fungisidinen ja jestisidinen teho (faasi 2/1)
- EN 13697 Ei-huokoisten pintojen testi elintarvike- ja muilla teollisuuden aloilla, kotitalouksissa sekä laitoksissa käytettäville desinfektioaineille. Bakterisidinen, fungisidinen ja jestisidinen teho (faasi 2/2)
- EN 14562 Kvantitatiivinen kantajatesti, fungisidinen ja jestisidinen teho (faasi 2/2)
- EN 16615 Kvantitatiivinen kantajatesti, bakterisidinen ja jestisidinen teho pyyhittäessä (faasi 2/2)

Virukset

- EN 14476:2013 + A1:2015 Kvantitatiivinen suspensiotesti, virusidinen teho (norovirus)

Käyttöohje

Käytetään kuiville pinnoille. Kaada Desiolia käsiteltävälle pinnalle tai kostuta kertakäyttöinen pyyhe Desiolilla. Käsittele desinfioitava väline tai pinta huolellisesti. Varmista, että ainetta on koko pinnalla. Odota, että etanoli on haihtunut ennen pinnan tai välineen käyttöönottoa.

Jälkihuuhtelu tapauskohtaisesti. Esim. limakalvokontaktiin tulevat ja Desiolilla käsitellyt välineet suositellaan huuhdeltavan. Suositellaan suojakäsineiden käyttöä.

Ei soveltuvat käyttökohteet

- Ei saa käyttää pinnoille ja välineille, jotka eivät siedä alkoholeja
- Ei saa käyttää instrumenttien kemialliseen desinfektioon liottamalla
- Ei kosteille ja kuumille pinnoille



Säilyvyys ja kelpoisuusaika

Säily oikein varastoituna huoneenlämmössä viisi vuotta avaamattomana ja kaksi vuotta avattuna.

Turvallisuus

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja pystyasennossa. Suojattava lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta. Tupakointi kielletty Desiolin välittömässä läheisyydessä. Jos kemikaalia joutuu silmiin, huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Lisää tuotteen turvallisuudesta käytöstä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkaus ja ympäristö

Pakkauksesta pullo ja kanisteri ovat HD-PE- ja sulkimet PP-muovia. Muoviset pakkausmateriaalit ovat kierrätyskelpoisia ja poltettavia. Muovinkeräykseen muovipakkaus soveltuu huuhdeltuna, kanisteri/pullo ja suljin eroteltuina. Pakkauskartonki lajitellaan kartonkikeräykseen. Pakkauksen ja valmisteen yhteensopivuus on laatuvarmennettu. Pienet määrät Desiolia voi huuhdella viemäriin runsaan veden kera ja suuremmat määrät toimitetaan erikseen jätteenkäsittelylaitokselle.

Alkuperämaa

Suomi

Koostumus

Etanoli 75 w-% / 81,3 vol-%
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita < 5%
Desinfioivana tehoaineena: N-alkyyliaminopropyyliglysiini
Vesi ad 100%

pH n. 7

Desiol 500 ml

Tuotenumero: 13240624
Myyntierä: 12 kpl
Lava: 840 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414504160285
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504234351

Desiol 5 litraa

Tuotenumero: 13240632
Myyntierä: 3 kpl
Lava: 108 kpl
GTIN vähittäistuote: 6414504180962
GTIN kuljetuspakkaus: 6414504234412

20220920