

# Tuotetiedot

## 724316 VACUETTE® URI-PLUS

Lyhyet käyttöohjeet

### 24 h vuorokausivirtsan keräys



On suositeltavaa käyttää erillistä puhdasta näytepurkkia jokaisella virtsaamiskerralla, ja tyhjentää näyte tästä näytepurkista isoon keräysastiaan.

HUOM! Säilytä keräysastia pystyasennossa keräyksen ja kuljetuksen ajan välttääksesi mahdollinen astian vuotaminen.

24 h keräysastian sisältö tulee sekoittaa huolellisesti ennen virtsan siirtämistä vakuumivirtsaputkeen.

### Näytteen siirto vakuumivirtsaputkeen



Nosta 24 h keräysastian kannessa oleva tarra ja paina napakasti vakuumivirtsanäyteputki kannen aukossa olevaan siirtoadapteriin.

Pidä putki paikallaan kunnes se on täyttynyt kokonaan.

Turvallisuussyistä kiinnitä tarra takaisin aukon päälle näytteen vakuumiputkeen siirron jälkeen.

Production location:  
ENFA Envases Farmacéuticos, S.A., C/Paralela,15. Paracuellos de Jarama,  
28860 Madrid, Spain  
Distributed by Greiner Bio-One GmbH, Austria



Greiner Bio-One GmbH  
Bad Haller Str. 32  
A-4550 Kremsmünster