



clinell[®] DESINFEKTIOPYYHE 2% KLOORIHEKSIDIINI, 70% ALKOHOLI 240KPL

Kertakäyttöinen desinfiointipyyhe ei-invasiivisten hoitotarvikkeiden desinfiointiin. Desinfioi infuusioletkusten venttiilit ja liitäntäkohdat, kanyyleiden lääkkeenantokorkit, veriviljelypullojen korkit, jne. Nopea- ja pitkävaikutteinen. 2 % klooriheksidiini ja 70% alkoholia sisältävien desinfiointipyyhkeiden käytön on osoitettu vähentävän katetrilähtöisiä infektioita ja todettu tehokkaammaksi kuin pelkästään 70% alkoholia sisältävä desinfiointipyyhe. Tuote on suonikatetrien infektioita ehkäisevästä desinfioinnista annettujen suositusten mukainen (epic 2 1 , NICE2 ja CDC4).

Pyyhkeen koko 109mmx105mm

CE 0473 luokan Ila terveydenhuollon lääkinnällinen laite

Valmistaja:

gama
healthcare

EFFECTIVE AGAINST	TEST	KILL TIME
Bacteria		
Enterococcus Hirae	EN14561	1 min
Pseudomonas auruginosa	EN14561	1 min
Staphylococcus aureus	EN14561	1 min

Käyttöohje:

1. Käytä suojäkäsineitä ja avaa pakkaus repäisemällä kulmasta 2. Pyyhi kanyyliä/venttiilikorkkia/veriviljelypullon kumikorkkia 30 sekuntia. 3. Hävitä käytetty pyyhe energia- tai sekajätteisiin.

Tuotenumero	Tuote	Valmistajan REF.-numero	Koko	Pakkauskoko
202535	CLINELL DESINFEKTIOPYYHE 2% KLOORIHEKSIDIINI, 70% ALKOHOLI 240KPL	CA2C240	109mmx105mm	240 kpl/ltk

Pamark Oy | Robert Huberin tie 2 | 01510 Vantaa
Puh. 0201 555 660 | etunimi.sukunimi@pamark.fi
Y-tunnus 0601684-7 | www.pamark.fi

