



Nocolyse

Desinfektioaine



Nocospray suurtehosumuttimessa käytettävä desinfektioaine. Vetyperoksidiin perustuva kuivahöyrytys on tehokas, jopa itiövaikutteinen kovien ja pehmeiden pintojen desinfiointiin soveltuva desinfektio menetelmä.

Käyttökohteet

Vetyperoksidiin perustuva kuivahöyrytys on tehokas, jopa itiövaikutteinen kovien ja pehmeiden pintojen desinfiointiin soveltuva desinfektio menetelmä suljetuissa sisätiloissa, kuten huoneet, työtilat, ambulanssit jne.

Desinfektio menetelmää suositellaan käytettäväksi siivouksen jälkeen. Erikoistilanteissa, esim. mikäli toimenpiteen tarkoituksena on henkilökunnan altistumisen ehkäisy, vetyperoksidisumutus voidaan tehdä siivousta edeltävänä toimenpiteenä.

Tuoteominaisuudet

Nocospray suurtehosumutin annostelee desinfektioainetta määritellyn huonetilavuuden mukaan 1 ml/m³.
Sumutusaika n. 36 s – 1 h (jonka aikana laite pitää kuuluvaa ääntä), kontaktiajan pituus tilan koosta riippuen 30 min – 1 h.

Käyttö- ja annostusohje

Irrota laitteesta pulloon kiinnitettävä yhdistäjä. Avaa Nocolyse-pullon turvatulppa, ohjaa yhdistäjän letku pulloon, kierrä pullo hyvin kiinni yhdistäjään ja aseta kokonaisuus tiiviisti takaisin paikalleen.

Nocospray vetyperoksidikuivahöyrytys:

Aseta laite mieluiten tilan nurkkaan siten, että kuivahöyry pääsee esteettömästi tilaan. Arvioi huoneen kuutiolavuus ja valitse laitteesta oikea arvo (10 - 1000 m³), käynnistä laite. Laite annostelee desinfektioainetta määritellyn huonetilavuuden mukaan 1 ml / kuutiometri. Käytettävä annostus 1 - 7 ml/m³. Merkkiään (10 s.) aikana poistu huoneesta ja sulje ovi. Höyrytysään sammuttua pidä huone edelleen suljettuna vähintään 30 minuuttia. Yli 500 m³ tiloissa kontaktiaika on 1 h. Yli 5 ml/m³ annostuksilla kontaktiaika 2 h. Tämän jälkeen huone on käytettävissä normaalisti.

Nocotest-kontrolliliuskat (tuotekoodi 8079): Ennen vetyperoksidikuivasumutusta kostuta liuskoja vedellä ja aseta niitä paikkoihin, joiden desinfektio näyttää hankalimmalta. Liuskojen väri muuttuu, kun desinfektioon tarvittava määrä kuivasumutettua vetyperoksidiä osuu niihin. Pakkaus sisältää 100 kpl.

Huomioitavaa

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen. Tutustu Nocospray-laitteen kirjallisiin käyttöohjeisiin.

Menetelmä ei edellytä ovien tiivistämistä tai ilmastoinnin sulkemista, mutta sumutus- ja kontaktiaikana käsiteltävässä tilassa ei voi oleskella tai käydä.

Mikäli käynti on välttämätön ja lyhytaikainen, on käytettävä tiiviitä suojalaseja ja kertakäyttöistä hengityssuojainta. Pitkäaikaisemmassa käytössä kesken sumutuksen on käytettävä hengityksensuojainta NO-P3 kaasusuodattimella. Lue suojautumisohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Koostumus**Tehoaine****Vaikutus**

Vetyperoksidia

6 %

mikrobisidinen tehoaine

hopea

17 ppm

katalysaattori

Tuotteen pH

4.5 hapan

Varastointi

Lämmin varasto, 5-25°C. Avaamaton pakkaus säilyy 2 v. valmistusajankohdasta. Käytä avattu pakkaus 2 kk aikana.

Ulkonäkö ja tuoksu

Väritön neste.

Valmistusmaa

RANSKA

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN**

8521

8522

8525

6 x 1 l

8078

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.