



Huuhteluspray silmän ja haavojen puhdistukseen

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Spray **pölyn ja lian huuhteluun** silmistä ja haavoista. Suihkuta 10–15 cm etäisyydeltä. Spraypullossa on tasainen suihku ja yhteensä 5 minuutin huuhtelu-aika. Toimii tehokkaana apuna mm. pintahaavojen puhdistuksessa. Pulloa voidaan käyttää useita kertoja ja huuhteluneste säilyy steriilinä viimeiseen pisaraan saakka.

HUOM! Spray ei korvaa silmänhuuhtelua akuuteissa silmätapaturmissa (esim. syövyttävien aineiden roiskeet), mutta toimii jatkohuuhteluna kuljetuksen aikana ensihuuhtelun jälkeen.

Pullon muoto mahdollistaa käytön kaikissa asennoissa, myös ylösalaisin. Läpinäkyvän korkin sinetti rikkoutuu ensimmäisellä avauksella. Pulloa voidaan säilyttää sekä pysty- että vaaka-asennossa. Huuhteluneste pullon sisällä on pakattu erilleen ponnekaasusta, joten ne eivät sekoitu keskenään. Sisältää 150 ml steriiliä keittosuolaliuosta, 0,9 % NaCl, sekä ympäristöystävällistä ponneainetta.

Tuote-edut

- Huuhteluspray sekä silmän että haavan puhdistukseen
- Sopii ensiapuasemaan
- Voidaan käyttää useita kertoja
- Steriili viimeiseen pisaraan



Tuotekuvat löytyvät: www.firstaid.cederroth.com kohdassa Downloads

Cederroth Eye & Wound Cleansing Spray

Säilyvyys 3 vuotta valmistuspäivämäärästä. Puhdista suutin ennen käyttöä suihkauttamalla kevyesti ilmaan. Painepulloa ei saa säilyttää yli 50 °C lämpötilassa. Ei saa hävittää rikkomalla tai polttamalla. Sisältää 150 ml steriiliä puskuroimatonta keittosuolaliuosta, 0,9 % NaCl. Huuhtelu-aika yht. 5 min.

150 ml/pullo
12 pulloa/ME

Pullon mitat: K 16,2 cm x Ø 5,3 cm

EAN-koodi ME
EAN-koodi pullo

7310807260006
7310617260005

REF 726000

Cederroth Oy, PL 95, 02231 Espoo Puh. 020 700 9250 Fax 020 700 9247 Sähköposti: firstaid@cederroth.com

www.firstaid.cederroth.com