

## Pikakäyttöohje



**1** Poista suojakalvo kyvetin päältä. Varo läikyttämästä puskuria. Tarkista, että nestepinta on kahden kyvetissä olevan viivan välissä. Älä koske kyvetin alaosaan.



**2** Laita mäntä kapillaarin oranssilla merkittyy pään. Ota näytettä (10 µl) kapillaarin valkoiseen "stopperiin" saakka. Varmista, ettei kapillaarissa ole ilmakuplia. Pyyhi ylimääräinen näyte pois kapillaarin ulkopinnalta.



**3** Lisää näyte (10 µl) kyvetin puskuriliuokseen painamalla mäntä pohjaan. Varmista, että kapillaari tyhjä kokonaan.



**4** Sulje kyvetti huolellisesti wrCRP-reagenssikorkilla. Älä paina korkin turkoosia sisäosaa alas. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



**5** Valitse QuikRead go -laitteen näytöltä "Mittaus".



**6** Laita kyvetti laitteeseen niin, että viivakoodi on itseesi päin. Mittauksen etenemistä voi seurata näytöltä.



**7** Mittauksen päätyttyä tulos ilmestyy näytölle, ja kyvetti nousee automaattisesti ylös mittauskammiosta. QuikRead go wrCRP+Hb -testin Hb-tulos näkyy CRP-tuloksen alapuolella.

*Tutustu käyttöohjeisiin ennen testin suorittamista.*

## Reagenssien säilytys



### Reagenssipakkaus

Avaamaton pakkaus 2–25 °C:n lämpötilassa: säilyy pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka



### Avaamattomat kyvetit foliopussin avaamisen jälkeen

Säilytys 2–8°C: 6 kuukautta

Säilytys 18–25°C: 3 kuukautta



### Reagenssikorkit avaamattomassa tai avatussa putkilossa

Avaamaton putkilo 2–25°C: pakkauksen viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Avaamisen jälkeen 2–25°C: 6 kuukautta



### Avattu kyvetti

Testi tulee tehdä kahden (2) tunnin kuluessa kyvetin avaamisesta. Anna puskurin lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen testin suorittamista. Näyte säilyy puskuriliuoksessa kahden (2) tunnin ajan.



### CRP-kontrollit (katso taulukko alla)

Avaamattomat pullo 2–8°C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Avattu pullo 2–8°C: enintään 2 kuukautta



### Hb-kontrolli (katso taulukko alla)

Avaamaton pullo 2–8°C: viimeiseen käyttöpäivämäärään saakka

Avattu pullo 2–8°C: enintään 1 kuukausi

Tuote	Tuotenumero	Tilausnumero Mediq Suomi Oystä
QuikRead go wrCRP, 50 testiä » sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät	146521	1701126
QuikRead go wCRP+Hb, 50 testiä » sisältää kapillaarit (10 µl) ja männät	146255	1701127
QuikRead go wrCRP kontrolli 1 ml	153038	1702752
QuikRead go wrCRP kontrolli High 1 ml	153039	1702753
Ultrasensitive CRP kontrolli 1 ml	68257	68257
QuikRead go Hb 10 µl kontrolli 1 ml	153656	1702845
QuikRead go 10 µl kapillaarit, 50 kpl	147851	1701128
QuikRead männät, 50 kpl	67966	67966
QuikRead go -laite	135867	–



Orion Diagnostica Oy  
Koivu-Mankkaan tie 6 B, PL 83  
02101 Espoo  
www.oriondiagnostica.fi, www.quikread.com

8046-05FI, 10/2018

Tilaukset: Mediq Suomi Oy, puh. 020 112 1510  
Lisätietoja tuotteista: e-mail: suomi@oriondiagnostica.fi