

Tuotenumero: 901903
Nimi: Cederroth Burn Cover Laastari

UUTUUS! Laastari palovammoihin. Sopii Cederroth ensiapuasemaan.

Cederroth Burn Cover laastarit suojaavat ja lievittävät kipua pienissä palovammoissa. Haavatyynyn viilentävä hydrogeeli peittää ihon hermopäätteet ja auttaa näin lievittämään kipua. Samalla kosteuttava vaikutus nopeuttaa palovamman paranemista ja ehkäisee arpikudoksen muodostumista. Haavatyyny ei tartu haavaan. Burn Cover laastari sopii myös pieniin haavoihin ja hiertymiin.

Cederroth Burn Cover laastari erottuu sinisen värinsä vuoksi, joten sitä voi käyttää myös elintarvikkeita käsitellessä.



Tuote-edut

- Lievittää kipua
- Hoitaa tehokkaasti
- Ei tartu haavaan

Käyttö:

- Jäähdytä palovammaa vähintään 20 minuuttia esim. Cederroth Burn Gel palovammageelillä tai haalealla vedellä, ennen kuin käytät laastaria
- Älä käytä suuriin ja vakaviin palovammoihin eikä tulehtuneisiin tai vuotaviin haavoihin
- Vaihda laastari ja puhdistaa haava päivittäin
- Jos laastari kuivaa, kostuta haavatyyny ennen irrottamista
- Hakeudu lääkärin hoitoon, jos komplikaatioita esiintyy

Pakkaus sisältää 10 steriiliä laastaria (74 x 45 mm)
Haavatyyny koostuu vesipitoisesta hydrogeelistä
Säilyvyys 3 vuotta

Pamark Oy

Robert Huberin tie 2
01510 Vantaa

PUHELIN 0201 555 660
FAKSI 0201 555 661

KOTISIVU www.pamark.fi
E-MAIL etunimi.sukunimi@pamark.fi

Y-TUNNUS 0601684-7