



Kiilto Pro Klorilli

Desinfiioiva puhdistusaine



Kloramin T-pohjainen desinfektioaine desinfiioivaan puhdistukseen sekä eritetahradesinfektioon. Biosidivalmiste ammattikäyttöön. Hajusteeton. Annostus 30 - 250 ml / 1 l. pH 12.

Käyttökohteet

Klorilli on orgaanista klooriyhdistettä sisältävä pesevä erikoisdesinfektioaine terveydenhoidon käyttöalueelle desinfiioivaan puhdistukseen sekä eritetahradesinfektioon myös eristystilanteissa. Biosidivalmiste ammattikäyttöön PT2.

Tuoteominaisuudet

Biosidisenä tehoaineena on nestemäinen kloramin T. Valmisteen sisältämä orgaaninen klooriyhdiste tuhoaa tehokkaasti bakteereja, viruksia ja sieniä. Tuotteella on erinomainen lianirrotuskyky.

Korkea pH pitää klooriyhdisteen sidotussa muodossa, valmisteen hajuttomana ja säilyvyyden hyvänä. Orgaaninen materiaali, lika ja mikrobit saavat pH:n alenemaan ja kloorin vapautumaan.

Mikrobisidisen tehon tutkimukset: EN 13727 (bakteerit), EN 13624 (hiivat), EN 13697 (bakteerit ja fungit), EN 14476 (polio-, adeno- ja norovirus) – täysi virusidinen teho.

Käyttö- ja annostusohje

Tee käyttölaimennos puhtaaseen, viileään (+20°C) veteen. Mittaa vesi ja Klorilli. Noudata ohjeeksi annettuja liotusaikoja.

Pintadesinfektiossa huuhtelu ei yleensä ole tarpeen käytettäessä 500 - 1000 ppm pitoisuuksia.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic pyyhepakkausta.

Klorillin käyttö- ja laimennusohjeet

	ppm	%	Klorilli	Vesi	Vaikutus-aika	Huom!
Pintojen puhdistus ja desinfektio / pyyhintä (saniteetti- ja huoltotilat)	500 1000	3 5	30 ml 50 ml	9,7dl 9,5dl		
Eritetahradesinfektio	500- 1000 5000	3-5 25	30-50 ml 2,5 dl	9,7-9,5 dl 7,5 dl		2-vaiheinen 1-vaiheinen
Siivousvälinedesinfektio (liotus)	5000	25	2,5 dl	7,5 dl	30 min	

Huomioitavaa

Käyttölaimennokset: Käytä erillisiä käyttölaimennospulloja ja -etikettejä. Merkitse etikettiin käyttölaimennoksen pitoisuus ja kelpoisuusaika.

Huomioi, sairaanhoitopiirin ohjeistamat erityiskäytännöt, esim. saniteettitilat.

Laimennusohjeita ja liotusaikoja noudattamalla, huolellisella huuhtomisella ja kuivaamisella minimoidaan korroosiovaikutuksia. Vältä roiskeita ja liian märkiä työskentelytapoja. Varmista, että käsiteltävä materiaali kestää kyseistä desinfektioainetta. Käytä asianmukaisia suojaimia.

Koostumus

Tehoaine	Vaikutus
----------	----------

Anionisia tensidejä	< 5 %	
Dinatriummetasilikaattia	< 5 %	korroosiosuoja
Klooriamiini T	5 - 15 %	biosidinen tehoaine

Muu koostumus

Aktiiviklooripitoisuus 2 % = 20 000 ppm

Tuotteen pH

13.1 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

12.0 vahvasti emäksinen

Varastointi

5 - 25°C, 2 v.

Valmistusmaa

SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

Pakkauskoko / Tuotekoodi

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
6 x 1 l	8109	6417964081091	6417964482461
3 x 5 l	8110	6417964081107	6417964482478

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.