




# Kiilto Pro Erinox

Erikoispesuaine

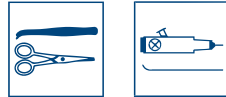

Erikoispesuaine terveydenhuollon ja hammashuollon instrumenttien ja välineistön käsinpesuun, ultraäänipesulaitteisiin sekä endoskooppien pesuun.

## Käyttökohteet

Ultraäänipesulaitteisiin, endoskooppien esipesuun, instrumenteille, hoitovälineistölle, laboratoriovälineille, herkälle lasitavaralle. Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

## Tuoteominaisuudet

Irrottaa tehokkaasti epäpuhtauksia ja rasvalikaa. Se sopii hyvin myös herkkien materiaalien puhdistukseen. Matalavaahtoinen erikoispesuaine instrumenttien ja hoitovälineistön puhdistukseen manuaalisesti ja ultraäänipesulaitteissa.

## Käyttö- ja annostusohje

Valmista ohjeen mukainen käyttölaimennos. Liuos vaihdetaan päivittäin. Käsin suoritettavassa puhdistuksessa käyttölaimennos tehdään jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen. Pestyt välineet huuhdellaan ja kuivataan. Aseta välineet väljästi ultraäänipesulaitteeseen, pesulämpötila likatyypistä riippuen max. 50 °C. Huuhtelee välineet pesun jälkeen. Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua.

## Erinox käyttö- ja laimennos ohjeet

|                         | %            | Erinox         | Vesi       | Huom!                                                   |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------|
| Ultraäänipesulaitteet   | 1 % -<br>2 % | 10 ml<br>20 ml | 1 l<br>1 l | vaihda laimennos 1-2 x pv<br>esiliotus tarvittaessa 2 % |
| Käsin suoritettava pesu |              |                |            |                                                         |
| - endoskoopit           | 2 %          | 20 ml          | 1 l        |                                                         |
| - muu välineistö        | 1- 2 %       | 10- 20 ml      | 1 l        |                                                         |
| Peruspesu/vaikea lika   | 5%           | 50 ml          | 0,95l      |                                                         |

## Huomioitavaa

Tarvittaessa desinfioi välineet ennen pesua. Vaihda käyttölaimennos päivittäin. Käsin suoritettavassa pesussa tee käyttölaimennos jokaista huoltotoimenpidettä varten erikseen.

## Koostumus

### Tehoaine

### Vaikutus

|                      |      |                                       |
|----------------------|------|---------------------------------------|
| Ionittomia tensidejä | < 5% | pesuteho                              |
| Polykarboksylaattia  | <5%  | dispergoi likaa, kompleksinmuodostaja |

## Tuotteen pH

10.0 heikosti emäksinen

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| Käyttöliuoksen pH                                                                  | 10.0 heikosti emäksinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |                 |
| Varastointi                                                                        | 5-25 C 3 vuotta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |                 |
| Ulkonäkö ja tuoksu                                                                 | Kirkas neste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |               |                 |
| Valmistusmaa                                                                       | SUOMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |               |                 |
| Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus                                                  | <p>Erinox erikoispesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).</p> <p>Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Helposti biologisesti hajoava.</p> |            |               |                 |
| Pakkauskoko / Tuotekoodi                                                           | Myyntierä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tuotekoodi | GTIN          | Myyntierän GTIN |
|                                                                                    | 6 x 1 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8113       | 6417964081138 | 6417964483536   |
|                                                                                    | 3 x 5 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8114       | 6417964081145 | 6417964483543   |
|                                                                                    | 1 x 200 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8148       | 6417964081480 |                 |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |                 |
| Lisätietoja                                                                        | <p>Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme <a href="http://www.kiilto.fi">www.kiilto.fi</a> tai asiakaspalvelustamme e-mail <a href="mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com">asiakaspalvelu@kiilto.com</a>.</p>                                                                                    |            |               |                 |