



Kiilto Pro Erinox Termo

Erikoispesuaine



Erikoispesuaine endoskooppien pesu-desinfektiolaitteisiin.

Käyttökohteet	Soveltuu käytettäväksi useimmissa endoskooppien pesu-desinfektiolaitteissa. Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.		
Tuoteominaisuudet	Tuotekehitetty erityisesti taipuisten tähyntinten koneelliseen pesuun. Tehokas orgaanisen lian irrottaja, silti materiaaleille hellävarainen. Vaahtoamaton ja helposti huuhtoutuva.		
Käyttö- ja annostusohje	Liitä kanisteri koneen automaattiannostelijaan. Suositeltava annostus n. 0,5 % (0,3-0,7 %).		
Huomioitavaa	Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että valmiste soveltuu käytössä olevan endoskooppien pesu- ja desinfektio koneessa käytettäväksi. Laitteiden tekninen huolto suorittaa annostelun kalibroinnin.		
Koostumus	Tehoaine	Vaikutus	
	Anionisia tensidejä	< 5 %	pesuteho
	Ionittomia tensidejä	< 5 %	pesuteho
	2-propanoli	< 5 %	isopropanoli, liuotin
	Natriumsitraatti	< 5 %	dispergointiaine
	Natriumpolyakrylaatti	< 5 %	dispergointiaine
	Natriumglukonaattia	5 - 15 %	dispergointiaine
	Monopropyleeniglykolia	5 - 15 %	liuotin
Tuotteen pH	10.0 heikosti emäksinen		
Käyttöliuoksen pH	9.5 heikosti emäksinen		
Ulkonäkö ja tuoksu	Kirkas, kellertävä neste		
Valmistusmaa	SUOMI		
Käyttö- ja ympäristöturvallisuus	Erinox Termo erikoispesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääikinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).		

**Pakkauskoko /
Tuotekoodi****Myyntierä****Tuotekoodi****GTIN****Myyntierän GTIN**

3 x 5 l

8141

6417964081411

6417964482508

Lisätietoja

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.