


Käyttöohjeet *:

VACUETTE®-turvasiipineula

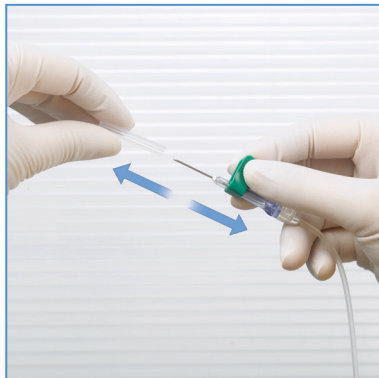


1 Poista neulansuojus




2 Suorita laskimopunktio




3 Työnnä putki ohjaimen

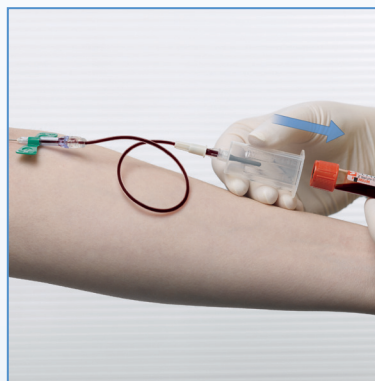


4 Poista viimeinen putki

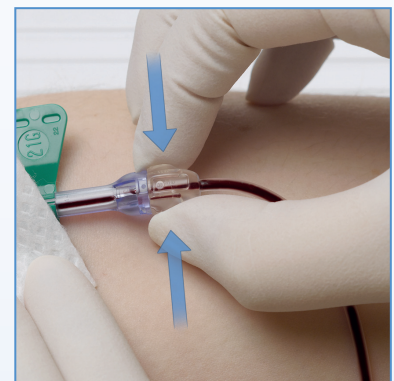

5 Aktivoi turvamekanismi (painamalla läpinäkyvistä ja karhennetuista muovipainikkeista vaaleansinisen runko-osan alapuolelta, samalla vetäen kirkasta osaa itseesi päin)

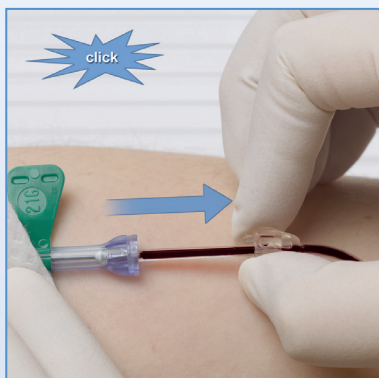

6 Napsahdus osoittaa aktivoinnin tapahtuneen

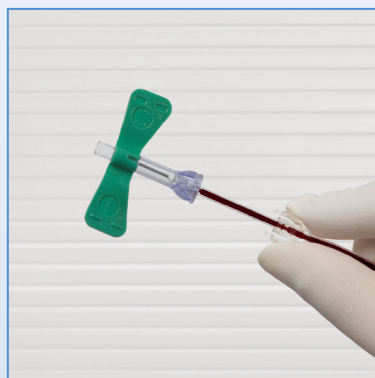

7 Käytetty turvasiipineula, jonka turvamekanismi on aktivoitu



8 Hävitä turvasiipineula asianmukaisesti

* Alkuperäiset ja täydelliset käyttöohjeet löytyvät "Instructions for Use" -kohdasta internetistä osoitteesta www.gbo.com/preanalytics.