




Kiilto Pro Alu Deko

Terveydenhuollon konepesuaine

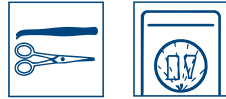

Nestemäinen, vaahtoamaton konepesuaine huuhtelu- ja pesudesinfektiolaitteisiin terveydenhuollon ja suun terveydenhoidon eri toimipisteissä.

Käyttökohteet

Välinehuollon ja toimenpideyksiköiden pesu-desinfektiokoneet, myös keskitettyihin välinehuoltoihin. Osastojen huuhtelu-pesukoneet, suun terveydenhuollon pesu-desinfektiokoneet.

Lääkinnällinen laite. Ammattikäyttöön.

Tuoteominaisuudet

Alu Deko on tuotekehitetty yleisesti terveydenhuollossa käytettävien konepestävien instrumenttien, välineiden ja materiaalien pesuun. Alu Deko konepesuaineessa on käytetty mahdollisimman työturvallisia ja ympäristömyönteisiä, tutkittuja raaka-aineita. Puhdistusteho on optimoitu ja testattu terveydenhuollon erityisvaatimusten mukaiseksi. Vaahtoamaton.

Käyttö- ja annostusohje

Liitä kanisteri pesukoneen automaattiannostelijaan. Ohjeellinen annostus huuhtelu- ja pesu-desinfektiokoneissa on n. 0,3 % käyttöliuos, 30 - 70 ml /pesu. Annostukseen vaikuttavat pestävä materiaali ja veden laatu. Paras puhdistustulos saadaan 45-55°C pesulämpötilassa. Kone lämpödesinfioi puhdistetut ja huuhdotut instrumentit sekä kammion valitun pesuohjelman mukaisesti.

Huomioitavaa

Huomioi laitteen täytössä, että vesisuihkut pääsevät pestävien välineiden kaikille pinnoille. Aseta pestävä välineistö väljästi koneeseen. Käytä tarvittaessa erikoistelineitä. Laitteen moitteeton toiminta on tarkistettava määräajoin turvallisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Noudata instrumenttivalmistajien erikoisohjeistuksia.

Koostumus

Tehoaine

Vaikutus

Kompleksointiainetta	5-15 %	sitovat veden kovuustekijöitä
Polykarboksylaattia	< 5 %	pesuteho, irrottaa likaa, sitoo sen veteen
Natriummetasilikaattia	< 5 %	pH:n säätelijä, irrottaa likaa, korroosiosuoja
Fosfonaatteja	< 5 %	pehmentää vettä, dispergoi likaa, nopeuttaa huuhtoutuvuutta

Tuotteen pH

13.0 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH

11.0 emäksinen

Varastointi

Huoneenlämmössä 3 v.

Ulkonäkö ja tuoksu

Kirkas, kellertävä neste

Valmistusmaa	SUOMI
Käyttö- ja ympäristö-turvallisuus	Alu Deko konepesuaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea). Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta. Helposti biologisesti hajoava.

Pakkauskoko / Tuotekoodi	Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
	3 x 5 l	80387	6417964803877	6417964482577
	1 x 20 l	8084	6412600080841	
	1 x 200 l	8280	6438160082804	



Lisätietoja	Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.fi tai asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
-------------	--