

Oxivir Excel Wipe Acti

Puhdistus- ja desinfointipyyhkeet ei-invasiivisille
lääkinnällisille laitteille ja koville vettä sietäville pinnoille

Kuvaus tuotteesta

AHP-tekniikalla toimiva puhdistus- ja desinfointipyyhe, joka puhdistaa ja desinfioi yhdellä käsittelyllä. Soveltuu ammattikäyttöön kaikille koville pinnoille ja ei-invasiivisille lääkitäville laitteille. (vain ammattikäyttöön.)

Ominaisuudet

- Käyttövalmis pyyhe, Ihanteellinen tuote kaikkiin käyttökohteisiin, mukaan lukien terveydenhuolto ja elintarviketilat
- Täysi virusidinen teho
- Nopea teho laaja-alaisesti viruksiin, bakteereihin ja hiivoihin
- Erinomainen puhdistuskyky
- Hajusteeton
- Ei tarvitse huuhtelua
- Vaikuttava aine hajoo vedeksi ja hapeksi
- BPR-hyväksytty biosidi
- Sertifioitu lääkitävinen laite

Edut

- Oxivir Excel Wipe Acti tarjoaa laajasti tehoa bakteereita, hiivoja ja viruksia vastaan lyhyellä vaikutusajalla. Puhtautta ja hygieniaa huolestuttavia patogeenejä vastaan
- BPR-hyväksytty ja kattavasti testattu eurooppalaisten standardien mukaisesti
- Oxivir Excel Wipe Acti on täysin viruksia tappava. Sen teho on todistettu sekä vaipattomia että vaipallisia viruksia vastaan. (esim. polion, adenoviruksen, hiiren noroviruksen sekä koronaviruksen, vacciniaviruksen, HIV:n, HBV:n, HCV:n ja influenssa)
- Oxivir Excel Wipe Acti puhdistaa erinomaisesti tehokkaiden pinta-aktiivisten aineiden ansiosta, mikä tekee siitä paitsi erinomaisen käyttövalmiin desinfointipyyhkeen myös erinomaisen puhdistuspyyhkeen
- AHP-koostumus on hellävarainen pinnoille. Eikä jätä jäämiä pintaan.
- Oxivir Excel Wipe Acti sopii päivittäiseen käyttöön kovien pintojen puhdistukseen ja desinfointiin sekä käytettäväksi julkisten tilojen kosketuspintoilla. (vähittäiskaupassa, kouluissa, ruokapalveluissa, pitkäaikaishoidossa ja muilla aloilla sekä sairaaloiden korkean riskin alueilla, kuten leikkaussaleissa, teho-osastoilla, vastasyntyneiden teho-osastoilla ja potilashuoneissa)
- Ei vaadi henkilönsuojaimia, ellei sitä käytetä pidempään



BPR
APPROVED

Diversey Europe
Operations B.V.
De Corridor 4,
3621 ZB Breukelen,
The Netherlands.
www.solenis.com



Oxivir Excel Wipe Acti

Käyttöohje

Käyttövalmis pyyhe, tehokas ja vaivoton puhdistus ja desinfiointi pinnoille. Käytä huoneenlämmössä:

- Poista karkea lika.
- Avaa kansi, ota yksi pyyhe ja sulje kansi.
- Levitä tuotetta kostuttamalla täysin pinta ja/tai ei-invasiivinen lääkinnällinen laite.
- Anna vaikuttaa 5 minuuttia.
- Anna kuivua ilmassa. Pintaa ei tarvitse huuhdella.
- Pese kädet käsittelyn jälkeen.

Käyttö: n. 1,5 m² yhdellä pyyhkeellä.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	Valkoinen pyyhe
Tuoksu:	Neutraali
pH-arvo (laimentamaton):	<2
Säilyvyys:	2 vuotta valmistuksen jälkeen (viimeinen käyttöpäivä: katso pakkaus). 28 päivää avaamisen jälkeen
Vaikuttava ainesosa:	0,36% vetyperoksidia

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

*** please contact Henk-Jan to provide your translation for this new standard sentence on CE-marked PIS's ***

Varoitus

Säilytys: 6–35 °C. Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut. Suojaa auringonvalolta. Käsittele noudattaen hyviä teollisuuden hygieni- ja turvallisuuskäytäntöjä. Pidä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinrehusta. Tuotetta ei ole tarkoitettu uudelleenkäyttöön. Varoitus: Voi syövyttää metalleja.

Henkilösuojaimet

Täydelliset ohjeet tämän tuotteen henkilösuojaimista on annettu erillisessä turvallisuustiedotteessa; sds.diversey.com.

Henkilösuojaimet: Käytä tarvittavia henkilösuojaimia. **Käsien suojaus:** Huuhtelee ja kuivaa kädet käytön jälkeen.

Pitkäaikaisessa kosketuksessa voi olla tarpeen suojata iho.

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Täydelliset ohjeet tämän tuotteen hävittämisestä löytyvät erillisestä turvallisuustiedotteesta; sds.diversey.com.

Yhteensopivuus

Oxivir Excel Wipes Acti on tarkoitettu käytettäväksi kovien pintojen desinfiointiaineena, mukaan lukien ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden kovat pinnat. Suositelluissa käyttöolosuhteissa Oxivir Excel Wipes Acti soveltuu käytettäväksi esimerkiksi ruostumattomalle teräkselle, kromille, vinyylille, nailonkankaille, laminoiduille pinnoille, lasille, kumille, koviin ja joustaville muoveille (polypropeeni, polyuretaani, polyeteeni, PVC-akryyli, lasikuitu ja polykarbonaatti). Muita kuin mainittuja käyttötarkoituksia ei suositella. Oxivir Excel Wipes Acti ei ole tarkoitettu käytettäväksi invasiivisissa lääkinnällisissä laitteissa. **Älä sekoita muiden tuotteiden kanssa. Ei sovellu huokoisille tai hapolle herkille pinnoille.**

Oxivir Excel Wipe Acti

Mikrobiologiset tiedot

Käyttöalue : PT2 Terveystenhoolto likaisissa olosuhteissa, PT2 Muu kuin terveydenhoolto likaisissa olosuhteissa & PT4 Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat likaisissa olosuhteissa

Käyttöalue	Vaatimukset	EN normi	Organisaatiot	Laimennus	Kontaktiaika
Kaato	Bakteereja tappava	EN 13727 EN 1276 EN 16615	E. hirae, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli.	RTU	5 min
	Yeasticidal	EN 13624 EN 1650 EN 16615	C. albicans		
	Viruksidinen	EN 14476	Adenovirus, Murine norovirus, Poliovirus		

Ympäristötiedot

Tässä tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat biologisesti hajoavia EU:n pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 vaatimusten mukaisesti.

Hyväksynnit

- Biosidi: BPR EU-0032483-0003 1-3
- Lääkinnällisten laitteiden ilmoitettu laitos: CE0044

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Kuvaus	Annostelutapa
9316225	OXIVIR EXCEL WIPES ACTI 12X100PC W4940	Pyyhkeet

www.diversey.com

© 2025 Diversey, Inc. All Rights Reserved. Rev.11/12/2025 fi-FI (K02979)