


Uro-Tainer®

RATKAISUJA KATETRIEN HUOLTOON

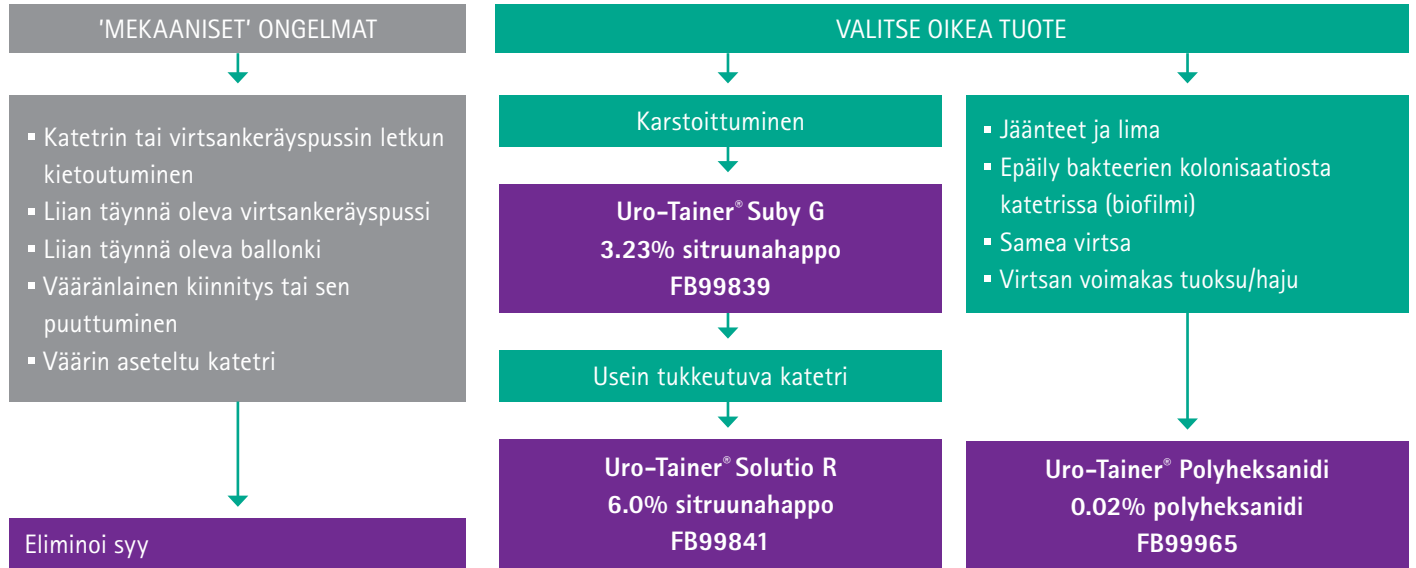

Tuotenimi	Tuotenumero	Kpl / Itk
Uro-Tainer® Suby G	FB99839	10
Uro-Tainer® Solutio R	FB99841	10
Uro-Tainer® PHMB 0.02%	FB99965	10

Jos katetri tukkeutuu 1-3 viikon kuluessa

- Käytä Uro-Tainer® Solutio R -huuhdetta joka päivä tai joka toinen päivä vähintään kahden viikon ajan
- Vähennä tämän jälkeen käyttökertoja 2-3 kertaa viikossa, jos mahdollista
- Harkitse mahdollista huuhteen vaihtoa Uro-Tainer® Suby G:hen

Jos katetri tukkeutuu neljän viikon välein tai harvemmin

- Aloita käyttämällä Uro-Tainer® Suby G -huuhdetta kahdesti viikossa

Akuutin katetriperäisen infektion yhteydessä

- Huuhtelee Uro-Tainer® Polyheksanidi -huuhteella paikallishoitona yhden kerran vuorokaudessa viikon ajan ja ylläpitohoitona 1-2 kertaa viikossa.

- Älä käytä Uro-Tainer® Solutio R ja Suby G -sitruunahappohuuhteita mikäli ilmenee yliherkkyyttä (allergiaa) jollekin huuhteen ainesosalle, virtsatieinfektion tai muiden sellaisten urogenitaali-alueiden sairauksien yhteydessä, joissa voi esiintyä hematuriaa (verivirtsaisuutta), useamman päivän aikana virtsarakko- tai virtsatieleikkauksen jälkeen.
- Älä käytä Uro-Tainer® Polyheksanidia mikäli ilmenee yliherkkyyttä (allergiaa) polyheksanidille, klooriheksidiinille tai huuhteen lisäaineelle, virtsatieinfektion tai muiden sellaisten urogenitaali-alueiden sairauksien yhteydessä, joissa voi esiintyä hematuriaa (verivirtsaisuutta).